



WHITENING^{evo} STRIPS

B

BRILLIANT SMILE™

SWEDEN

VAD ÄR WHITENING^{evo} STRIPS?

Brilliant Smiles Whitening^{evo} strips är en tandblekningsprodukt för hemma-
bruk. Behandlingen är smidig att utföra på egen hand, effektiv och framförallt
helt säker. Produkten liknar en tunn genomskinlig plastremsa med en mild
tandblekningsgel på ena sidan, som ska fästas direkt på tandraden. Gelen
innehåller 6 % väteperoxid.

FÖRPACKNING

Whitening^{evo} strips är engångsremsor som ligger styckförpackade - en remsa
för överkäken och en för underkäken i samma förslutna styckpåse. I varje
paket medföljer 14 styckpåsar, vilket med andra ord räcker till 14 dagars an-
vändning.

INSTRUKTIONER

Plocka av remsan från plastfilmen och applicera direkt på rena och torra tänder,
med gelsidan mot tänderna. Stryk fingrarna längs med remsan så den
sitter fast och vik in kanten på baksidan tänderna. Låt remsan sitta kvar 1-2
timmar, beroende på hur länge du vill bleka dina tänder. Remsorna är näst-
intill osynliga och kan därför användas "on-the-go", till exempel under tiden
man gör sig iordning inför en fest eller på väg till jobbet. När du är klar drar
du av remsan och slänger den. Brilliant Smile rekommenderar att du undviker
tobak och kraftigt färgad mat och dryck under hela behandlingsperioden för
att säkerställa att du får bästa möjliga resultat.

BEHANDLINGSTID

Whitening^{evo} strips används i 1-2 timmar/dag, i 14 dagar eller tills man är nöjd
med resultatet. De flesta når önskat resultat redan efter 7 dagars användan-
de. Remsorna som blir över kan du spara och använda vid ett senare tillfälle
om så önskas.

OM BRILLIANT SMILE SWEDEN

Brilliant Smile är ett svenskt varumärke och företaget grundades i Göteborg,
Sverige, år 2003. Vi är idag en av den svenska marknads största aktörer
inom tandblekning. Företaget har byggt upp ett gott rykte genom att erbjuda
kvalitetsprodukter som avlägsnar missfärgningar och ger vita tänder, utan
att skada tändernas emalj.